

ノルディトロピン® フレックスプロ® 注専用穿刺用補助具 「フレックスプロ® ペンメイト®」をご使用のみなさまへ

ノボ ノルディスク ファーマ株式会社

ノルディトロピン® フレックスプロ® 注専用穿刺用補助具「フレックスプロ® ペンメイト®」にペン
ニードル® プラスをご使用になる場合、使用方法によって、「取り付けにくい」または「取り外しにくい」
と感じる場合があることを、弊社社内で実施した検証において確認いたしました。

注射針の「取り付け」および「取り外し」の際には、いま一度以下の点にご注意の上、ご使用くださ
いますよう、お願い申し上げます。

注射針の取り付けおよび取り外しのポイント

■ 注射針の取り付け時

- 穿刺用補助器具（フレックスプロ® ペンメイト®）ではなく、注入器本体（ノルディトロピン® フレックスプロ® 注）を持って注射針を取り付けてください。
- 注射針をゴム栓に対してまっすぐに、奥までしっかり刺してください。その後針ケースごと回し、取り付けてください。



■ 注射針の取り外し時

- 穿刺用補助器具（フレックスプロ® ペンメイト®）ではなく、注入器本体（ノルディトロピン® フレックスプロ® 注）を持ってください。
- 針ケースを注射針に対してまっすぐに、奥までしっかり取り付けてください。その後、針ケースごと回して、注射針を取り外してください。



製造販売元

ノボ ノルディスク ファーマ株式会社

〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-1-1
www.novonordisk.co.jp

JP/NT/1116/0211 (2016年11月作成)

